

Gebrauchsanweisung SCHUHZURICHTUNG

Ich bin froh, dass du mich wieder mit nach Hause nimmst. Die Operation war gar nicht so einfach!

Du musst wissen, dass ich all diese Torturen auf mich genommen habe, damit du wieder besser laufen kannst.

Wir sind doch beste Freunde und du trägst mich ja auch gerne, nicht wahr? Ich bin jetzt fertig zugerichtet. Wie der Arzt gesagt hat, habe ich eine Erhöhung bekommen oder eine andere Zurichtung. Jetzt kannst du wieder prima laufen, aber **du musst jetzt ganz besonders aufpassen**. Warum? Na, du musst dich wieder an mich und an deine neue Laufsituation gewöhnen.

Lauf mit mir **am ersten Tag** 45 Minuten. **Am zweiten Tag** darfst du mich schon unbegrenzt tragen. Am Anfang wird es dir etwas komisch vorkommen, wenn du mit mir rumläufst. Aber daran gewöhnst du dich.

Bitte ruf meinen Erschaffer an, wenn du anhaltende Schmerzen haben solltest oder dir etwas Ungewöhnliches auffällt. Da ich baulich verändert wurde und hier und da ein Schnitt gemacht werden und viel geklebt werden musste, damit ich wieder hübsch bin, kann es sein, dass die Verklebung auch wieder aufgeht. Keine Sorge! Ich bin dann nicht kaputt, ich kann wieder zusammengeklebt werden.

Bitte leg mich nicht auf Hitzequellen. Die Verklebung kann sich schnell lösen. **Bitte wasche mich nicht in der Waschmaschine.** Ich bin zwar nicht aus Zucker, aber ich kann mich trotzdem auflösen. Gott sei Dank tauche ich aber in der Waschmaschine im Gegensatz zu Socken doch wieder auf. Dennoch - ich kann kaputtgehen, und dann bist du traurig. Also, mach das lieber nicht.

Mein Erschaffer hat mich mit viel Liebe zugerichtet, damit man den Unterschied nicht sieht.

ICH HOFFE, ICH GEFALLE DIR!

NA, DAS WAR JETZT
EIN TRIP!

FOOTOPIA
ORTHOPÄDIE UND LIFESTYLE.
FOOTOPIA Orthopädie & Lifestyle
Inh.: Anastasia Anastasiadou
Brüder-Grimm-Straße 7
36396 Steinau an der Straße
Werkstatt 06663 47498-16
www.footopia.de





Und hier für die Freunde DER OFFIZIELLEN TEXTE

Sehr geehrte(r) Kundin/Kunde/Patient(in),

Sie haben von Ihrem Fachbetrieb für Orthopädie-Schuhtechnik ein für Sie individuell hergestelltes Paar **Schuhzurichtungen/Therapieschuhe** erhalten. Die individuelle orthopädische Schuhzurichtung Ihrer Schuhe zur Linderung bzw. Kompensation Ihrer Fußprobleme wurde speziell für Sie sorgfältig gefertigt und vor Abgabe eingehend geprüft. Behandeln Sie Ihre Schuhe einschließlich der orthopädischen Schuhzurichtung bitte sorgfältig. Wir geben Ihnen anbei noch einige Tipps und Hinweise zur Pflege und Handhabung.

Anwendungshinweise

Verschließen Sie bitte die Schnür, Klett- oder Druckverschlüsse genügend fest und überprüfen Sie den richtigen Halt. Bei Erstversorgungen bitten wir um einen Kontrolltermin vor Ablauf der 4. Trageweche. Ansonsten sollten Ihre Schuhe mind. 1 x pro Jahr von Ihrem Orthopädie-Schuhtechniker begutachtet werden. Je nach Verschleiß auch häufiger. Merke: Abgelaufene und schiefgetretene Schuhe können orthopädische Probleme verursachen, bitte bringen Sie solche Schuhe umgehend zu Ihrem Schuhtechniker zur Reparatur.

Laufen Sie bei Erstversorgung Ihre orthopädisch zugerichteten Schuhe in den ersten Tagen nur stundenweise ein. Prüfen Sie Ihre Schuhzurichtung und Ihre Schuhe vor jeder Verwendung auf einwandfreien Zustand. Achten Sie beim Anziehen Ihrer Schuhe auf deren richtige Seitenzuordnung (links/rechts). Bei Beschwerden oder Schäden an Ihrer orthopädischen Schuhzurichtung oder Ihren Therapieschuhen verwenden Sie Ihre orthopädisch zugerichteten Schuhe/Therapieschuhe auf keinen Fall ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Ihrem Orthopädie-Schuh-

techniker. Der Wirkungsgrad der Schuhzurichtungen kann von Schuh zu Schuh verschieden sein und der Wirkungsgrad verliert sich im Laufe eines Jahres und sollte von Ihrem Arzt überprüft werden. Führen Sie an Ihrer orthopädischen Schuhzurichtung und an Ihren Therapieschuhen auf keinen Fall Änderungen bzw. Reparaturen in Eigenregie durch.

Zweckbestimmung des Produktes/Indikation

Die individuell gefertigten Schuhzurichtungen/Therapieschuhe sind für folgende Zwecke/Indikationen bestimmt: Knick-Senk-Fuß, Spreizfuß, Spreizfuß und Vorfußdeformitäten, Klumpfuß, Hohlfuß, posttraumatische Zustände, diabetischer und neuropathischer Fuß, rheumatischer Fuß, Fersensporn und Plantarfazziitis, anatomische Varietäten wie Haglundferse, Os tibiale externum etc., statische und dynamische Fehlstellungen der unteren Extremitäten und auch der Wirbelsäule, angeborene Fehlbildungen, Köhler II und III, Frakturen usw.

Zulässige Einsatzbedingungen/-orte

Die individuell gefertigten Schuhzurichtungen/Therapieschuhe können im Innen- und Außenbereich getragen werden. Auch bei unterschiedlichen Temperatur- und Wetterbedingungen. Bitte beachten Sie, dass die Sohlen bei Glätteis nicht ausreichend Halt auf dem jeweiligen Untergrund bieten (Sturzgefahr!).

Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen können sein: in seltenen Fällen Hautirritationen durch Material-Allergien und extreme Schweißbildung. In seltenen Fällen Verletzungen der Haut durch Materialermüdung und negative Veränderungen an Skelett und Bandapparat durch Überkorrektur.

Reinigungs- und Desinfektionshinweise

Die individuell gefertigten Schuhzurichtungen/Therapieschuhe sind je nach Material unterschiedlich zu pflegen. Für die richtige Produktauswahl wenden Sie sich an Ihren Orthopädie-Schuhtechniker, dieser berät Sie gern kompetent. Durchfeuchtete Schuhe sind mit Papier aufzufüllen und über 2 Tage bei Raumtemperatur zu trocknen. Bitte trocknen Sie die Schuhe NICHT mit Wärmequellen wie Ofen, Föhn oder Heizung. Verwenden Sie des Weiteren keine Desinfektionsmittel oder scharfen Reinigungsmittel im Oberleder- und Futterbereich.

Wartungshinweise

Bei Verschleißerscheinungen des Materials bitte zeitnah an Ihren Orthopädie-Schuhtechniker wenden. Achten Sie bitte generell auf Materialermüdung, es sollte bei Bedarf rechtzeitig erneuert werden.

Verwendete Materialien

Für die Herstellung von individuell gefertigten Schuhzurichtungen/Therapieschuhen werden Materialien wie thermoplastische Kunststoffe (PE), Sohlenmaterial (Gummi) verwendet.

Bei eventuellen Unklarheiten, Problemen oder Defiziten der Schuhe wenden Sie sich an Ihren Orthopädie-Schuhtechniker.

IHR NÄCHSTER KONTROLLTERMIN: